

# IDEXX VetLab Station

## Guia de Referência Rápida

Para obter mais informações sobre como usar a IDEXX VetLab\* Station (como adicionar testes para execução, reatribuir resultados e inserir resultados de teste do SNAP\*), acesse [idexx.com/product-info](https://idexx.com/product-info) e/ou [learn.idexx.com](https://learn.idexx.com).



## Navegação na tela inicial

### Ícones de status dos equipamentos

Saiba quais equipamentos estão em execução e/ou disponíveis com os ícones codificados por cor.

- **Verde (Pronto):** Conectado e em comunicação
- **Amarelo (Ocupado/Em espera):** Em uso ou no Modo de Espera
- **Cinza (Offline):** Conexão perdida
- **Vermelho (Alerta):** Ocorreu um problema. Toque no ícone para mais informações

### Lista Pendente ou Lista de Censo

Se você tiver um sistema integrado de gerenciamento de informações práticas (PIMS), poderá modificar as configurações da Tela inicial para incluir uma lista Pendente e/ou uma lista de Censo; uma vez habilitada, use seta para baixo para escolher qual das seguintes listas você deseja exibir:


- **Lista Pendente**—Veja uma lista de pacientes que têm requisições abertas em seu PIMS integrado e toque no nome de um paciente para iniciar uma execução de amostra. Você também pode usar o ícone Excluir para excluir pacientes selecionados da lista Pendente.
- **Lista de Censo**—Veja uma lista de pacientes que foram internados na clínica por meio do seu PIMS integrado e toque no nome do paciente para iniciar uma execução de amostra.

**Botão Pesquisar**  
Toque para pesquisar um paciente específico na lista Pendente ou Censo (a que estiver sendo exibida) e inicie a execução da amostra.

**Botão Adicionar/ Analisar amostra**  
Toque para inserir manualmente as informações do paciente e iniciar a execução de uma amostra.

**Lista Em processo**  
Veja quais testes estão atualmente em execução, aguardando execução ou exigem ação.

### Centro de mensagens


Toque em  para exibir as notificações da IDEXX.

### Indicador do IDEXX SmartService

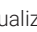
A cor do pequeno círculo indica o status da conexão das Soluções IDEXX SmartService\*:

- **Verde:** Conectado
- **Amarelo:** Conectando
- **Cinza:** Desativado
- **Vermelho:** Offline

### Ícone de engrenagem

Toque em  para abrir o menu no qual você poderá acessar telas específicas dos equipamentos, personalizar as configurações, obter ajuda, exibir mensagens ou desligar o sistema.

### Ícone Exibir todos os resultados

Toque em  para visualizar todos os resultados e históricos de diagnósticos por paciente.


### Botão Pesquisar Registros

Pesquise um registro de paciente específico.



### Lista Resultados

Veja uma lista de resultados de pacientes na clínica nos últimos 7 dias. Toque para selecionar um paciente e exibir ou imprimir seus resultados.

## Início de uma execução de amostra com um PIMS integrado

1. Toque no paciente desejado na lista **Pendente** ou **Censo** na Tela inicial ou toque em  para pesquisar um paciente na lista **Pendente** ou **Censo**.
2. Selecione os equipamentos desejados e toque em **Iniciar**.

## Início de uma execução de amostra diretamente na IDEXX VetLab Station

1. Toque em  ou  na Tela inicial.
2. Selecione/digite as informações do paciente:
  - + **Se for um novo paciente**—Toque em **Adicionar novo paciente**, insira as informações do paciente/cliente e toque em **Próximo**. Em seguida, confirme/especifique as informações do paciente/da clínica, selecione os equipamentos desejados e toque em **Iniciar**.
  - + **Se for um paciente existente**—Toque na caixa **Paciente, Sobrenome** ou **ID do cliente** e comece a digitar as informações aplicáveis. Toque para selecionar o paciente desejado da lista e toque em **Próximo**. Em seguida, confirme/especifique as informações do paciente/da clínica, selecione os equipamentos desejados e toque em **Iniciar**.
  - + **Se for um paciente da emergência**—Toque em **Stat**. Selecione a **Espécie** e o **Estágio da vida**. O sistema insere automaticamente um carimbo de hora exclusivo para identificar o paciente (que pode ser usado posteriormente ao reatribuir os resultados de teste). Toque em **Próximo**.
3. Selecione os equipamentos desejados e toque em **Iniciar**.

## Inserção/edição manual de resultados de teste do SNAP

### Para inserir manualmente os resultados de teste do SNAP:

1. Toque no ícone **SNAP** na lista Em processo, ou toque em **Inserir resultados** na caixa de diálogo SNAP Timer completo.
2. Toque na imagem que corresponde à janela de resultados do seu teste do SNAP.
3. (Opcional) Toque na guia **Comentário** e, em seguida, insira sua ID de usuário e um comentário para esse resultado de teste.
4. Toque em **Salvar**.

### Para editar resultados de teste do SNAP:

1. Na tela de resultados, toque em **Gerenciar resultados**.
2. Toque em **Editar resultados manuais** e, em seguida, selecione o resultado de teste do SNAP a ser editado.
3. Faça as alterações e toque em **Salvar**.

## Inserção manual de propriedades físico-químicas da urinálise




### Para adicionar as propriedades físico-químicas da urina durante uma execução:

1. Inicie uma execução de urinálise.
2. Quando solicitado a selecionar os ícones dos equipamentos desejados, toque no ícone **UA manual** e, em seguida, selecione o método de coleta, a cor e a clareza da amostra.
3. Insira a gravidade específica da amostra.
4. Toque na cor que corresponde ao pH da amostra.
5. Se todas as análises químicas estiverem normais, toque em **Definir todos como Negativo/Normal**; caso contrário, especifique os resultados apropriados. (Se você alterar apenas alguns resultados, toque em **Próximo** quando terminar.)
6. Insira qualquer comentário e toque em **Concluído**.

### Para editar as propriedades da UA manual:


1. Na tela de resultados, toque em **Gerenciar resultados**.
2. Toque em **Editar resultados manuais** e, em seguida, selecione o resultado da UA manual a ser editado.
3. Faça as alterações e toque em **Salvar**.

## Visualização e impressão de resultados


1. Realize uma das seguintes ações:
  - + Para visualizar os resultados imediatamente após a conclusão da execução, toque na mensagem de alerta Novos resultados.
  - + Para visualizar os resultados capturados nos últimos 7 dias, toque no nome do paciente na lista Resultados na tela inicial.
  - + Para visualizar o histórico de resultados:
    - Em Resultados na tela inicial, toque em **Pesquisa de registros** ou toque em , procure e selecione o paciente desejado e, em seguida, toque em **Visualizar**.
    - Em qualquer tela que não seja a tela inicial, toque em , procure e selecione o paciente desejado e, em seguida, toque em **Visualizar**.
2. Toque na guia que contém os resultados desejados.
3. Toque em  para imprimir um relatório abrangente de todos os resultados de teste a partir da guia selecionada.

## Manutenção semanal

A IDEXX recomenda reiniciar o sistema semanalmente.

1. Toque em  e, em seguida, toque em **Desligar**.
2. Toque em **Desligar** ou **Reiniciar**.

## Personalizar as configurações

É possível personalizar a IDEXX VetLab Station para atender às necessidades de sua clínica. Toque em , e em seguida, toque em **Configurações**.