


Guia de referência rápida

Requisitos de armazenamento e manuseio

- + Não é necessário aquecimento ou preparação de fluidos – execute diretamente do refrigerador.
- + Guardar no refrigerador. Não congelar.
- + Pode ser armazenado em embalagens fechadas em temperatura ambiente por até 8 horas, até 5 vezes. Após 8 horas, guarde os materiais não utilizados e fechados na geladeira.
- + Se congelado acidentalmente:
 - + <8 horas, descongele em temperatura ambiente por pelo menos 60 minutos antes de usar.
 - + >8 horas, descarte.

Catalyst SmartQC simplificado: carregue e use

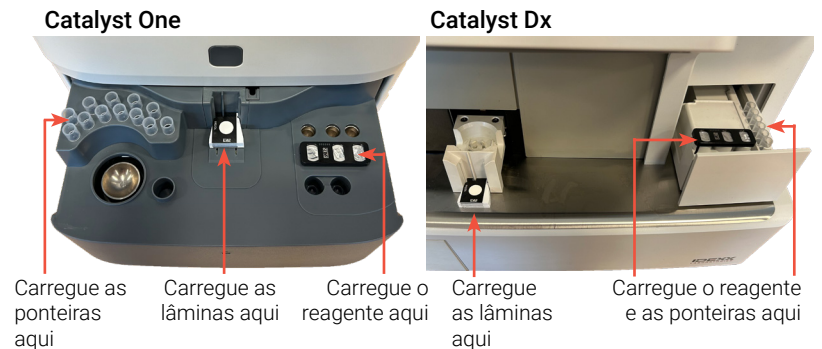

Perguntas frequentes

Pergunta	Resposta
O que é o Catalyst SmartQC Control?	O Catalyst SmartQC Control é um material de controle de qualidade (um Catalyst CLIP e um pacote de reagentes) usado para verificar se seu analisador químico Catalyst One* ou analisador químico Catalyst Dx* está funcionando corretamente.
Quando devo usar o Catalyst SmartQC?	O Catalyst SmartQC deve ser executado mensalmente após a limpeza dos componentes internos do analisador, na instalação ou sempre que o analisador for movido.
Como executo o Catalyst SmartQC?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpe os componentes internos do seu analisador Catalyst. 2. Para o Catalyst One: Toque no ícone Catalyst One na tela inicial da IDEXX VetLab* Station e depois toque em Maintenance (Manutenção) > SmartQC > Run SmartQC (Executar SmartQC). OU Para o Catalyst Dx: Toque no ícone Catalyst Dx na tela inicial da IDEXX VetLab Station e depois toque em SmartQC > Run SmartQC (Executar SmartQC). 3. Siga as instruções na tela da IDEXX VetLab Station (Catalyst One) ou da tela sensível ao toque do Catalyst Dx (Catalyst Dx) para carregar os materiais SmartQC no seu analisador e concluir a execução.
Posso executar o Catalyst SmartQC com uma amostra de paciente ou com outros CLIPs/lâminas do Catalyst?	Não, carregue apenas pontas de pipeta e o Catalyst SmartQC CLIP e reagente para a execução do controle de qualidade – não carregue um copo de amostra, separador de sangue total ou outros CLIPs/lâminas (incluindo o Catalyst* Lyte 4 CLIP, que antes era necessário para o controle de qualidade mensal).
Qual é o tempo de execução do Catalyst SmartQC?	Os resultados do Catalyst SmartQC estão disponíveis em menos de 15 minutos após o início da execução.
O Catalyst SmartQC fornece resultados?	<p>Sim, a execução do Catalyst SmartQC fornecerá resultados “pass (aprovados)” ou “out of range (fora do intervalo)”:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Os resultados pass (aprovados) confirmam que seu analisador está funcionando perfeitamente e você pode prosseguir usando o analisador conforme necessário. + Os resultados out of range (Fora do intervalo) indicam que um problema foi detectado durante a execução. Se você receber um resultado “out of range (fora do intervalo)”, execute novamente com novas lâminas e reagente Catalyst SmartQC. Se a segunda execução também estiver “out of range (fora do intervalo)”, entre em contato com o Suporte Técnico e ao Cliente da IDEXX para obter assistência.
Como faço para enviar um lembrete para mim mesmo quando o Catalyst SmartQC precisa ser executado no meu analisador?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para o Catalyst One: Toque no ícone Catalyst One na tela inicial da IDEXX VetLab* Station e depois toque em Maintenance (Manutenção) > SmartQC. OU Para o Catalyst Dx: Toque no ícone Catalyst Dx na tela inicial da IDEXX VetLab Station e depois em Quality Control (Controle de qualidade). 2. No lado esquerdo da tela, use as listas suspensas aplicáveis para selecionar quando você deseja receber uma mensagem de lembrete recorrente.