

IDEXX VetLab Station

Guia de Referência Rápida

Para obter mais informações sobre como usar a IDEXX VetLab* Station (como adicionar testes para execução, reatribuir resultados e inserir resultados de teste do SNAP*), acesse idexx.com/product-info e/ou learn.idexx.com.



Navegação na tela inicial

Ícones de status dos equipamentos

Saiba quais equipamentos estão em execução e/ou disponíveis com os ícones codificados por cor.

- **Verde (Pronto):** Conectado e em comunicação
- **Amarelo (Ocupado/Em espera):** Em uso ou no Modo de Espera
- **Cinza (Offline):** Conexão perdida
- **Vermelho (Alerta):** Ocorreu um problema. Toque no ícone para mais informações

Centro de mensagens

Toque em  para exibir as notificações da IDEXX.

Indicador do IDEXX SmartService

A cor do pequeno círculo indica o status da conexão das Soluções IDEXX SmartService*:

- **Verde:** Conectado
- **Amarelo:** Conectando
- **Cinza:** Desativado
- **Vermelho:** Offline

Ícone de engrenagem


Toque em  para abrir o menu no qual você poderá acessar telas específicas dos equipamentos, personalizar as configurações, obter ajuda, exibir mensagens ou desligar o sistema.

Reticências (...)

Clique em "... " para as opções de exibir a lista do Censo ou remover solicitações da lista Pendente.

Lista Pendente

Veja quais pacientes têm solicitações abertas no seu Sistema de gestão de informações da clínica (PIMS).

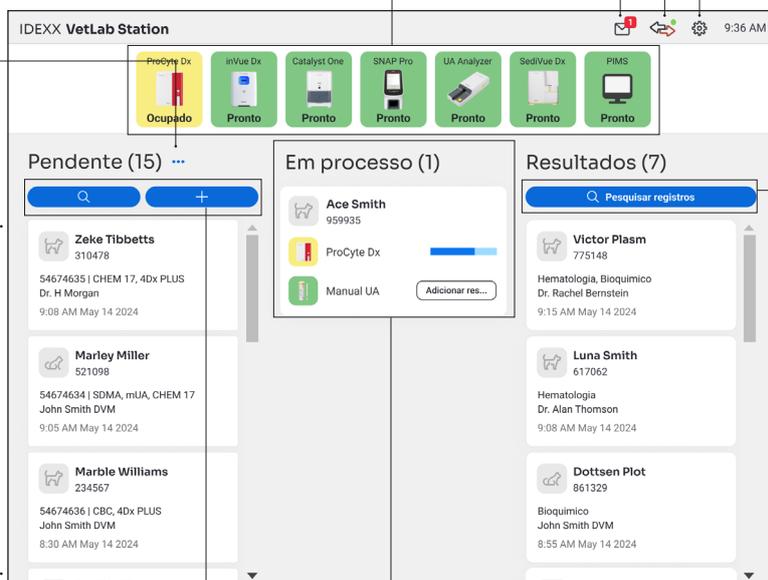

Pesquisa de registros

Pesquise registros de paciente.

Resultados

Veja uma lista de resultados de pacientes na clínica nos últimos 7 dias. Toque para selecionar um paciente e exibir ou imprimir seus resultados.

Botões Pesquisar e Adicionar

Toque em **Pesquisar** para pesquisar um paciente na lista Pendente. Toque em **Adicionar** para inserir manualmente as informações do paciente.

Área Em processo

Veja quais testes estão atualmente em execução, aguardando execução ou exigem ação.

Início de uma execução de amostra com um PIMS integrado

1. Toque no paciente desejado na lista **Pendente** ou **Censo** na tela inicial, ou toque em  para pesquisar um paciente na lista **Pendente**.
2. Selecione os equipamentos desejados e toque em **Executar**.

Início de uma execução de amostra diretamente na IDEXX VetLab Station

Toque em  na tela inicial e, em seguida:

Se for um novo paciente:

1. Toque em **Adicionar novo paciente**, insira as informações do paciente/cliente e toque em **Próximo**.
2. Confirme/especifique as informações do paciente/da clínica, selecione os equipamentos desejados e toque em **Executar**.

Se for um paciente existente:

1. Toque na caixa **Paciente, Sobrenome** ou **ID do cliente** e, em seguida, comece a inserir as informações aplicáveis. Toque para selecionar o paciente desejado da lista e toque em **Próximo**.
2. Confirme/especifique as informações do paciente/da clínica, selecione os equipamentos desejados e toque em **Executar**.

Se for um paciente da emergência:

1. Toque em **Agora**.
2. Selecione a **Espécie** e o **Estágio da vida**. O sistema insere automaticamente um carimbo de hora exclusivo para identificar o paciente (que pode ser usado posteriormente ao reatribuir os resultados de teste).
3. Toque em **Próximo**.
4. Selecione os equipamentos desejados e toque em **Executar**.

Inserção/edição manual de resultados de teste de teste do SNAP

Para inserir manualmente os resultados de teste do SNAP:

1. Toque no ícone **SNAP** na área Em processo, ou toque em **Inserir resultados** na caixa de diálogo SNAP Timer completo.
2. Toque na imagem que corresponde à janela de resultados do seu teste do SNAP.
3. (Opcional) Toque na guia **Comentário** e, em seguida, insira sua ID de usuário e um comentário para esse resultado de teste.
4. Toque em **Salvar**.

Para editar resultados de teste do SNAP:

1. Na tela de resultados, toque em **Gerenciar resultados**.
2. Toque em **Editar resultados manuais** e, em seguida, selecione o resultado de teste do SNAP a ser editado.
3. Faça as alterações e toque em **Salvar**.

Inserção manual de propriedades físico-químicas da urinálise

Para adicionar as propriedades físico-químicas da urina durante uma execução:

1. Inicie uma execução de urinálise.
2. Quando solicitado a selecionar os ícones dos equipamentos desejados, toque no ícone **UA manual** e, em seguida, selecione o método de coleta, a cor e a clareza da amostra.
3. Insira a gravidade específica da amostra.
4. Toque na cor que corresponde ao pH da amostra.
5. Se todas as análises químicas estiverem normais, toque em **Definir todos como Negativo/Normal**; caso contrário, especifique os resultados apropriados. (Se você alterou apenas alguns resultados, toque em **Próximo** quando terminar.)
6. Insira qualquer comentário e toque em **Concluído**.

Para editar as propriedades da UA manual:

1. Na tela de resultados, toque em **Gerenciar resultados**.
2. Toque em **Editar resultados manuais** e, em seguida, selecione o resultado da UA manual a ser editado.
3. Faça as alterações e toque em **Salvar**.

Visualização e impressão de resultados

1. Realize uma das seguintes ações:
 - + Toque no paciente na lista Resultados na tela inicial.
 - + Toque na mensagem de alerta de novos resultados.
 - + Em Resultados, na tela inicial, toque em  **Pesquisar registros**, pesquise e selecione o paciente desejado e, em seguida, toque em **Exibir**.
2. Toque na guia que contém os resultados desejados.
3. Toque em  para imprimir um relatório abrangente de todos os resultados de teste a partir da guia selecionada.

Manutenção semanal

A IDEXX recomenda reiniciar o sistema semanalmente.

1. Toque em  e, em seguida, toque em **Desligar**.
2. Toque em **Desligar** ou **Reiniciar**.

Personalizar as configurações

É possível personalizar a IDEXX VetLab Station para atender às necessidades de sua clínica. Toque em  e, em seguida, toque em **Configurações**.